

自動化內視鏡再處理流程評核表

流程	內容	合格	不合格	備註
一、裝機	1. 取出內視鏡			
	2. 裝上內視鏡附件			
	3. 接上主機			
	4. 接上水瓶接頭			
	5. 接上吸引管			
二、開機				
三、測試功能	1. 檢查彎曲角度			
	2. 送氣/送水			
	3. 吸引			
	4. 確認鏡頭是否乾淨			
	5. 執行白平衡			

前置清洗評核表

流程	內容	合格	不合格	備註
四、前置清洗	避免汙染內視鏡不回掛			
	1. 擦拭			
	2. 吸引			
	3. 功能測試			
	4. 目視檢測			
	關機(主機+光源機) (避免交叉感染)			
	取下內視鏡手勢			
	蓋上防水蓋			
	5. 運送			

※ 考試時間 3 分鐘

A 表 考生注意事項：

一、 裝機：

1. 取出內視鏡之標準手勢：
(a)插入部不碰觸其他部位
(b)手握操作部及連接部
(c)不得敲到鏡頭。

2. 內視鏡所有的配件接頭須與主機完全接合。

二、 開機：確實執行開機，若主機型號不同可詢問考官。

三、 測試功能：

1. (a)所有測試功能均需口述並確實執行(b)角度固定器需放鬆。
2. 鏡頭是否乾淨：
(a)需開燈前檢查鏡頭(b)開燈後看螢幕確認。

四、 前置清洗：

1. 為避免汙染，內視鏡不回掛。
2. 擦拭插入部須擦到底，不得來回擦。
3. 吸引功能於酵素瓶中操作，並口述抽吸方式。
4. 功能測試：送氣/送水於清水瓶中操作，並口述測試時間 15 秒。
5. 目視檢測內視鏡是否有咬痕和損傷。
6. 關機關閉(主機+光源機)。
7. 取下內視鏡不得凹折內視鏡。
8. 確實蓋上防水蓋。
9. 運送(口述即可)。