

附件一：高層次消毒劑--MEC 測試

鄰苯二甲醛; Ortho-phthalaldehyde (OPA)

廠牌	商品名	濃度	接觸時間	判讀時間	MEC
ASP	Cidex®OPA	0.55 %	1 秒	90 秒	0.3 %
國韶 (MetriCide)	®OPA Plus	0.6 %	2 秒	60 秒	0.3 %
添崑 (Rapicide)	®OPA-28	0.575 %	3 秒	90 秒	0.35 %
長固 (Anios)	®OPASTER	0.55 %	1 秒	60 秒	0.3 %
Opal	Whiteley	0.57 %	3 秒	90 秒	0.35 %
宏友	OPIDEX OPA	0.55 %	1 秒	90 秒	0.3 %

戊二醛; Glutaraldehyde (Cidex)

廠牌	商品名	濃度	接觸時間	判讀時間	MEC
ASP	Cidex	2.4 %	3 秒	75 秒	1.5 %
元佑 (Olympus)	Wavicide-01	2.65 %	1 秒	30 秒	1.7 %

過醋酸; Peracetic Acid (PAA)

廠牌	商品名	濃度	接觸時間	判讀時間	MEC
元佑 (Olympus)	Acecide	0.33 %	3 秒	7 秒	0.2 %
添崑 (Medivators)	Rapicide PA RTU	0.225 %	1 秒	30 秒	1000 ppm
富士 (FUJIFILM)	Sanacide-ES	0.3 %	3 秒	7 秒	0.2 %
元佑 (Franklab)	Peralex 9 Hecto+	900ppm	2 秒	45 秒	750ppm

附件二：高層次消毒劑--AER 設定時間

鄰苯二甲醛; Ortho-phthalaldehyde (OPA)

廠牌	商品名	溫度	浸泡時間
ASP	Cidex®OPA	20 度	5 分鐘
國韶 (MetriCide)	®OPA Plus	25 度	5 分鐘
添崑 (Rapicide)	®OPA-28	20 度	5 分鐘
長固 (Anios)	®OPASTER	20 度	5 分鐘
Opal	Whiteley	20 度	5 分鐘
宏友	OPIDEX OPA	25 度	5 分鐘

戊二醛; Glutaraldehyde (Cidex)

廠牌	商品名	溫度	浸泡時間
ASP	Cidex	室溫	20 分鐘
元佑 (Olympus)	Wavicide-01	22 度	45 分鐘

過醋酸; Peracetic Acid (PAA)

廠牌	商品名	溫度	浸泡時間
元佑 (Olympus)	Acecide	20 度	5 分鐘
富士 (FUJIFILM)	Sanacide-ES	20 度	5 分鐘
添崑 (Medivators)	Rapicide PA RTU	20 度	5 分鐘
元佑 (Franklab)	Peralex 9 Hecto+	20 度	10 分鐘